

Finicare™ FIA Plus


Kurzanleitung




Standardtest-Modus



1. Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Adapter an das Stromnetz an. Überzeugen Sie sich davon, dass der PC/MAC -Schalter auf „MAC“ steht. Nach dem Einschalten wird die Software geladen und der Testkarten-Schlitten automatisch ausgefahren.

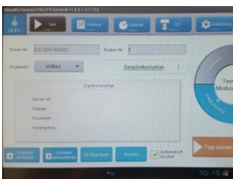


2. Nach Erscheinen des Hauptmenüs wählen Sie unter Test Modus „Standardtest“ und das korrekte Probenmaterial aus. Geben Sie die Patienteninformationen ein. Bereiten Sie die Testkarte vor und setzen Sie den zugehörigen ID-Chip „“ in den ID-Chip-Einschub ein.



3. Geben Sie das genaue Probenvolumen entsprechend den Anweisungen der Testkits in den Puffer ein und mixen Sie sorgfältig.



4. Entnehmen Sie die Testkarte der Verpackung. Geben Sie das vorgeschriebene Volumen des Proben-Puffer-Gemisches in das Probenauftragsfeld der Testkarte, setzen Sie diese umgehend in den Testkarten-Schlitten des **Finicare™ FIA Plus** ein und klicken auf „Test starten“.

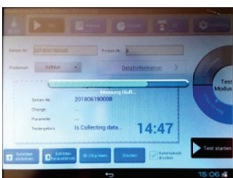

5. Beim Lesen der Testkarte durch das **Finicare™ FIA Plus** identifiziert und überprüft das Gerät die Übereinstimmung der Chargennummern von Testkarte und ID-Chip. Bei Nichtübereinstimmung wird eine Meldung angezeigt. Das Gerät startet den Count-down der Inkubationszeit und zeigt den Fortschritt an.

Ergebnisanzeige	
Serien-Nr.:	197001020037
Charge:	D20210206
Parameter:	NT-proBNP
Testergebnis:	19699.5 pg/mL

6. Das Gerät liest automatisch die Testkarte und zeigt nach Ablauf der Inkubationszeit das Ergebnis an.



7. Klicken Sie auf „Drucken“, um das Ergebnis auszudrucken.

Finecare™ FIA Plus


Kurzanleitung




Schnelltest-Modus



1. Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Adapter an das Stromnetz an. Überzeugen Sie sich davon, dass der PC/MAC-Schalter auf „MAC“ steht. Nach dem Einschalten wird die Software geladen und der Testkarten-Schlitten automatisch ausgefahren.

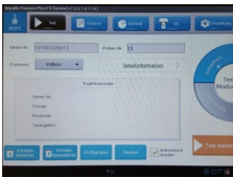

2. Nach Erscheinen des Hauptmenüs wählen Sie unter Test Modus „Schnelltest“ und das korrekte Probenmaterial aus. Geben Sie die Patienteninformationen ein. Bereiten Sie die Testkarte vor und setzen Sie den zugehörigen ID-Chip „“ in den ID-Chip-Einschub ein.




3. Geben Sie das genaue Probenvolumen entsprechend den Anweisungen der Testkits in den Puffer ein und mixen Sie sorgfältig.



4. Bereiten Sie Testkarte und Timer vor. Geben Sie das vorgeschriebene Volumen des Proben-Puffer-Gemisches in das Probenauftragsfeld, starten Sie umgehend den Timer zur Überwachung der Inkubationszeit. Achten Sie entsprechend der Testanleitung auf die Umgebungstemperatur und die exakte Einhaltung der Zeit.



5. Setzen Sie unmittelbar nach Ablauf der Reaktionszeit die Testkarte in den Testkarten-Schlitten des **Finecare™ FIA Plus** und klicken Sie auf „Test starten“.

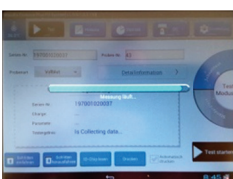

6. Beim Lesen der Testkarte durch das **Finecare™ FIA Plus** identifiziert und überprüft das Gerät die Übereinstimmung der Chargennummern von Testkarte und ID-Chip. Bei Nichtübereinstimmung wird eine Meldung angezeigt.

Ergebnisanzeige	
Serien-Nr.:	197001020037
Charge:	D20210206
Parameter:	NT-proBNP
Testergebnis:	19699.5 pg/mL

7. Das Gerät liest automatisch die Testkarte und zeigt nach Ablauf der Inkubationszeit das Ergebnis an.



8. Klicken Sie auf „Drucken“, um das Ergebnis auszudrucken.